

INSTALLER LA TOILE DOUBLE CUISSARDE DU LÈVE-PERSONNE SOUS UNE CLIENTE COUCHÉE DANS LE LIT

Équipement

Caractéristiques de la cliente : pas de mise en charge et peu de tonus du tronc et des membres supérieurs.



Relever légèrement la tête du lit pour favoriser le confort de la cliente et éviter le basculement de sa tête vers l'arrière lors de son soulèvement.

Étape 1




INTERVENANTE 1

- ♦ Plier la toile en deux et l'installer sur la cliente en utilisant des repères afin de la centrer.

INTERVENANTE 2

- ♦ Tourner la cliente vers soi.

Étape 2

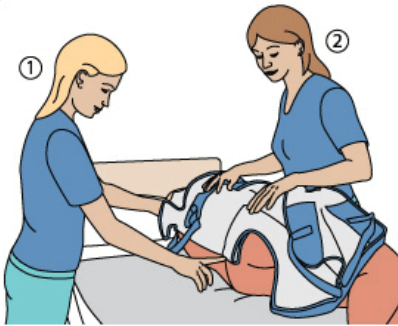

INTERVENANTE 1

- ♦ Mettre le pli du centre de la toile au milieu du dos de la cliente et positionner le bas de la toile au niveau de son coccyx.

INTERVENANTE 2

- ♦ Maintenir la toile en position sur la cliente.

Étape 3



INTERVENANTE 1

- ♦ Déplier une partie de la toile et l'insérer sous la cliente.

INTERVENANTE 2

- ♦ Maintenir l'autre partie de la toile en place.

Étape 4



INTERVENANTE 1

- ♦ Tourner la cliente vers soi.

INTERVENANTE 2

- ♦ Prendre la toile insérée sous la cliente et la déplier sur le lit.
- ♦ Ramener la cliente sur le dos; elle doit être centrée sur la toile.

Étape 5



INTERVENANTES 1 ET 2

- ♦ Insérer les cuissardes sous les cuisses de la cliente.
- ♦ Croiser les deux petites sangles intérieures de la cuissarde entre elles.

Étape 6



INTERVENANTES 1 ET 2

- ♦ Croiser les deux grandes sangles extérieures des cuissardes dans les petites sangles intérieures.

Mise en garde : la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations.