

Guide d'utilisation Quadtro Select






permobil

Coussin ROHO QUADTRO SELECT


Prévention anti escarre +++ et Positionnement +++

4 compartiments permettent le positionnement spécifique du bassin

Ouvert - bouton
vert enfoncé

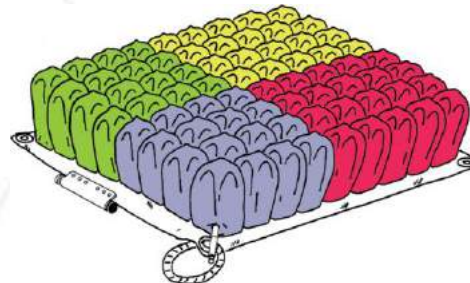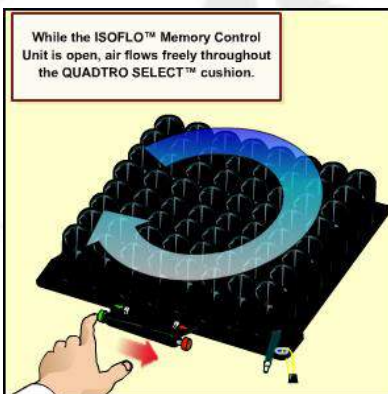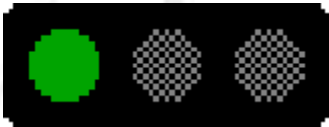


Fermé - bouton
rouge enfoncé

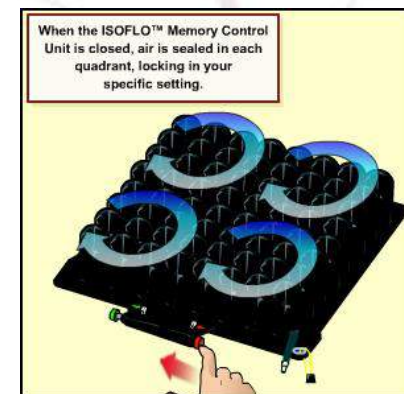


permobil

Ajustement de ROHO® QUADTRO SELECT®

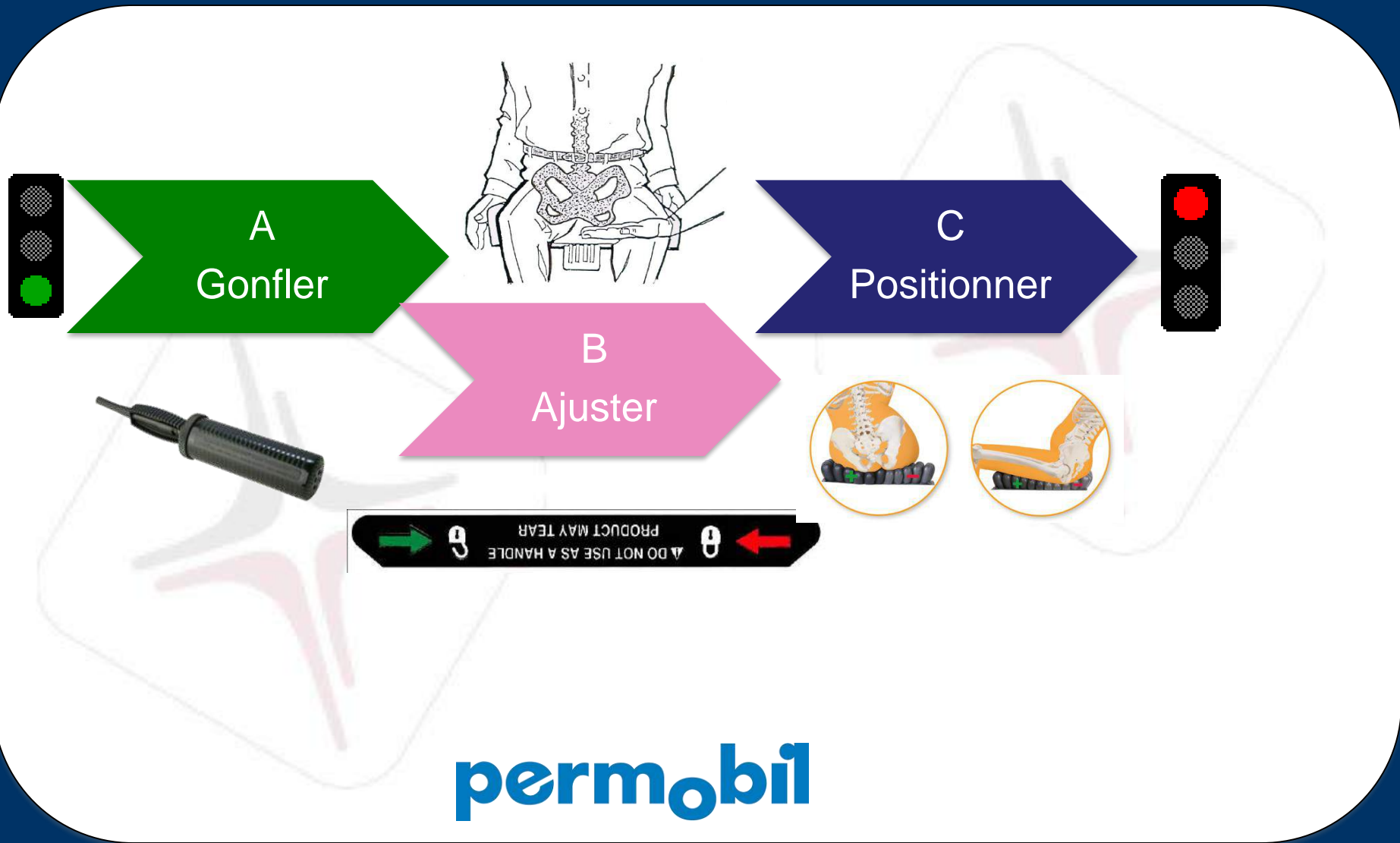

permobil

Étape 1 - Surgonfler le coussin

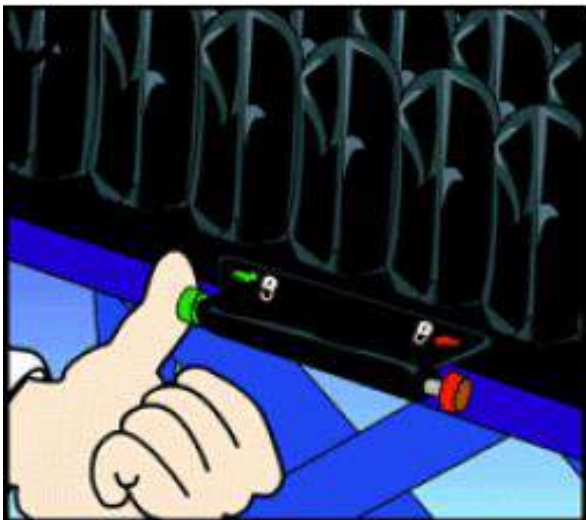


ISOFLOW OUVERT (bouton vert appuyé) ROHO[★]

Remarque : le coussin peut être gonflé lorsque le patient est assis sur le coussin

permobil

Étape 2 - Positionner l'utilisateur sur le coussin


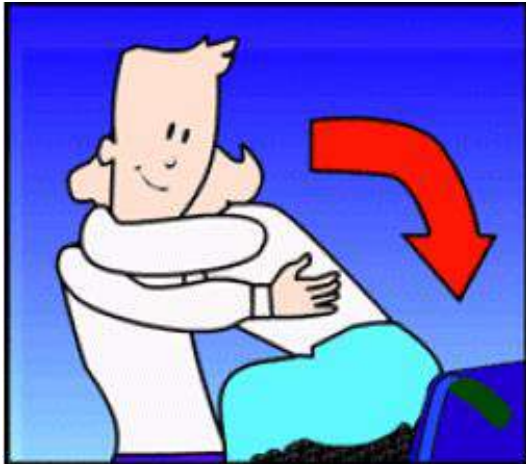


- Vérifiez que l'utilisateur est assis le plus au fond possible dans le fauteuil.
- Vérifiez que les repose-pieds et accoudoirs sont bien réglés.
- Vérifiez que l'utilisateur est assis en position de repos normale.

permobil

Étape 3 – Ajuster le coussin

Glissez la main sous l'ischion **le plus bas**

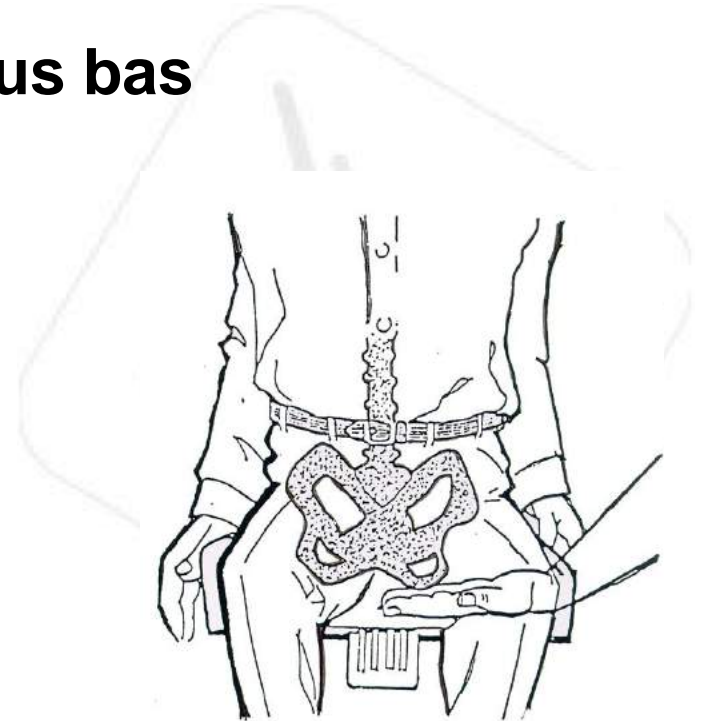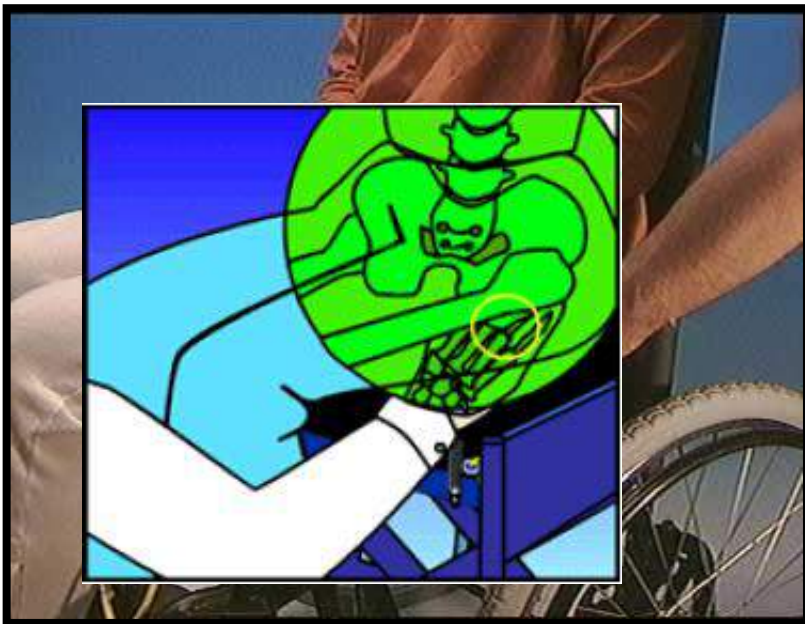


Remarque : inutile de retirer la housse pour effectuer un ajustement précis

permobil

Étape 4 – ouvrir la valve et laisser sortir l'air

Lorsque la main touche le bas/la base, refermez la valve.
Il doit rester environ 1,5 cm d'air entre l'utilisateur et la base.
L'utilisateur doit être **DANS** le coussin et **PAS SUR** le cousin.

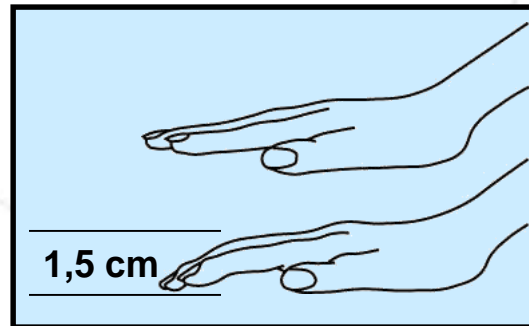

**1,5 cm entre
l'utilisateur et la
base.**

Le coussin est maintenant bien réglé


permobil

Étape 5 – Positionnement

Positionner la personne dans la position souhaitée
Bloquer la position en appuyant sur le rouge



Obliquité de bassin : + d'air d'un côté :
pencher d'un côté ou de l'autre

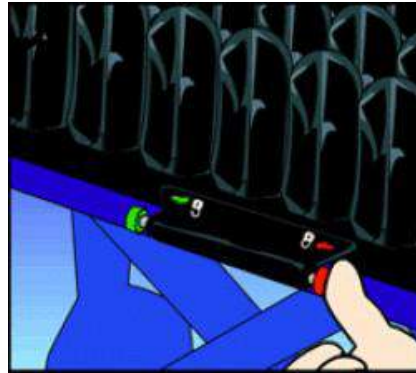

Rétroversion de bassin : + d'air en
avant : lever les jambes

permobil