


## MISE EN MODE MANUEL

Pour désactiver les moteurs, c'est-à-dire pour qu'une tierce personne puisse pousser le fauteuil roulant, il suffit d'abaisser les poignées situées de chaque côté des roues arrières du fauteuil. Pour activer les moteurs à nouveau, il faut tirer les poignées vers le haut.

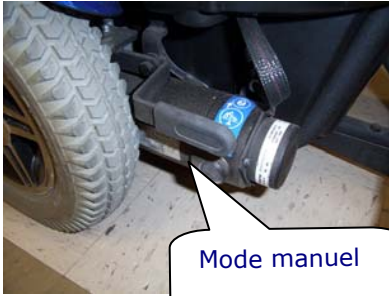

Mode manuel



Mode électrique

Le fauteuil motorisé, il est important de vérifier à plusieurs éléments afin de s'assurer que le transfert se fera de façon sécuritaire.

1. Tout d'abord, le fauteuil devrait **toujours** être éteint lorsque vous souhaitez vous y asseoir ou vous en relever.
2. Avant de se lever, assurez-vous que la ceinture de sécurité est détachée.
3. Les appui-pieds devraient être escamotés afin de libérer l'espace devant vous. Pour ce faire, appuyez sur les leviers gris situés sur le côté externe des appui-pieds et poussez ceux-ci vers l'extérieur.



Levier gris



Si le boîtier de contrôle vous gêne lors de votre transfert, il est également possible de l'escamoter. Pour ce faire, il suffit de pousser sur le support du boîtier de contrôle à l'intérieur et de pousser le boîtier vers l'extérieur. Pour le ramener, il suffira de le pousser vers l'intérieur jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

# Q 600

FAUTEUIL ROULANT MOTORISÉ



Centre de réadaptation  
**Constance-Lethbridge**  
7005, De Maisonneuve Ouest.  
Montréal, Québec  
H4B 1T3



## MISE EN MARCHÉ DU FAUTEUIL

Afin de mettre le fauteuil en marche, il faut pousser vers le haut la manette situé à gauche du boîtier de contrôle. L'écran couleur s'allumera et le fauteuil sera alors prêt à fonctionner.

## ARRET DU FAUTEUIL

Pour éteindre le fauteuil, il suffit de pousser la même manette vers le bas.



## KLAXON

Le bouton jaune situé sous l'écran est utilisé pour klaxonner.

## VARIATION DE VITESSE AVEC LA MANETTE

En appuyant délicatement sur la manette, le fauteuil avancera doucement, alors qu'en poussant au maximum, la vitesse augmentera.



## PROFILS

Le fauteuil Q 600 possède 5 profil. Chacun d'entre eux est représenté par la lettre "P" (profil). Donc, au premier profil, on voit apparaître "P1" au bas à droite de l'écran. Des bâtonnets indiquent la vitesse et un affichage numérique indique les kilomètres / heure.

## CHANGEMENT DE PROFIL

Pour effectuer un changement de profil, il faut pousser vers le haut la manette située à gauche du boîtier de contrôle.



## POTENTIOMÈTRE

La vitesse peut également être ajustée en tournant la manette situé à droite du boîtier de contrôle. Le potentiomètre permet de graduer chacune des 5 vitesses du fauteuil. En le tournant vers le bas, on diminue la vitesse et en le tournant vers le haut, on l'augmente.

## INDICATEUR DE CHARGE

La série de voyants lumineux indiquant la charge de l'appareil est située dans le haut de l'écran. Il s'agit d'une série de carrés verts placés en demi-cercle au-dessus de l'icône représentant la batterie. Quand la charge diminue les carrés verts perdent leur couleur. De plus, un indicateur numérique affiche le pourcentage de charge restant à l'intérieur de l'icône représentant la batterie.

## RECHARGER LA BATTERIE

Lorsque la moitié des carrés verts de l'indicateur de charge ont perdu leur couleur, il est temps de recharger la batterie. Pour ce faire, il suffit de brancher au mur le fil situé au dos de l'appareil.

