



MISE EN MODE MANUEL

Pour désactiver les moteurs, c'est-à-dire pour qu'une tierce personne puisse pousser le fauteuil, il faut pousser vers l'avant les leviers jaunes situés de chaque côté du fauteuil. Pour activer les moteurs à nouveau, il faut tirer les leviers vers l'arrière.

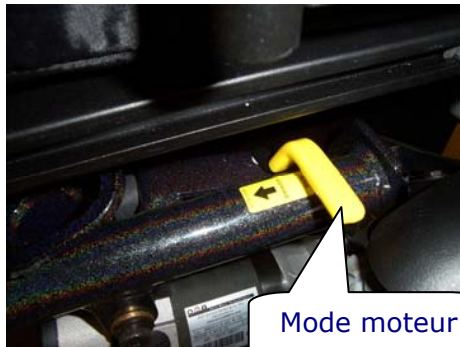

Le fauteuil ou de tant de faire les transferts afin de faciliter l'effectuation de

- 1 Le fauteuil doit **toujours** être éteint lorsque vous souhaitez vous y asseoir ou vous en relever.
2. Avant de se lever, la ceinture de sécurité doit être détachée.
3. Les appuis-pieds devraient être escamotés afin de libérer l'espace devant vous. Pour ce faire, poussez vers l'extérieur le levier jaune et poussez les appui-pieds sur chaque côté.

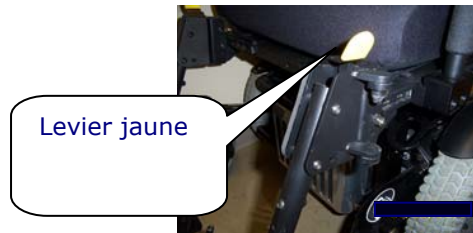

Si le boîtier de contrôle vous gêne lors de vos transferts, il est également possible de l'escamoter. Pour ce faire, il suffit de presser vers le bas le petit levier noir situé derrière le boîtier de contrôle et de pousser le boîtier vers l'extérieur. Pour ramener le boîtier de contrôle, il suffira de le pousser vers l'intérieur jusqu'à ce qu'un "clac" se fasse entendre.

Quickie 747

FAUTEUIL MOTORISÉ



Centre de réadaptation
Constance Lethbridge

7005, de Maisonneuve O.
Montreal Québec

H4B 1T3



MISE EN MARCHÉ DU FAUTEUIL

Afin de mettre le fauteuil en marche, vous devez appuyer sur le bouton vert situé dans le haut du boîtier de contrôle. L'écran s'allumera et le fauteuil sera alors prêt à fonctionner.

MISE EN ARRÊT DU FAUTEUIL

Afin de mettre le fauteuil en arrêt, vous devez appuyer sur le bouton vert. L'écran s'éteindra et le fauteuil sera hors circuit.




KLAXON

Le bouton rouge situé sous le bouton vert sert à klaxonner.

VARIATION DE VITESSE AVEC LA MANETTE

En appuyant délicatement sur la manette, le fauteuil avancera doucement, alors qu'en poussant au maximum, la vitesse augmentera rapidement.

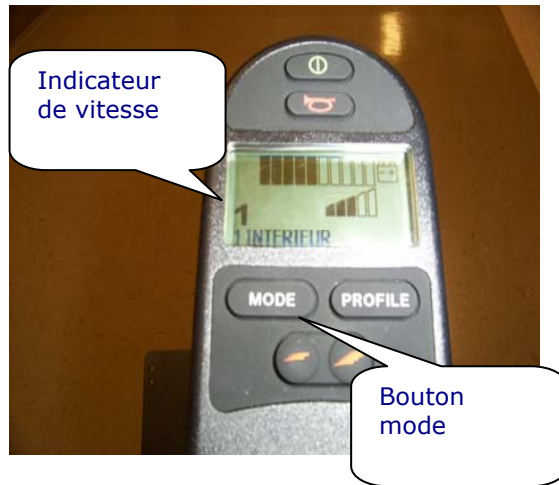

INDICATEUR DE VITESSE

L'indicateur de vitesse est situé dans le bas de l'écran du boîtier de contrôle. Il est représenté par un chiffre de 1 à 4 situé au-dessus des mots "INTÉRIEUR" ou "EXTÉRIEUR".

BOUTON MODE

Ce bouton est utilisé pour faire fonctionner différents éléments électroniques.

Ex: bascule motorisée, appuis jambes élévateurs.

CHANGEMENT DE VITESSE

Le bouton "PROFILE", situé à droite du boîtier de contrôle, sert à effectuer les changements de vitesse. Ce bouton doit être utilisé lorsque le fauteuil est immobile. Appuyer autant de fois que nécessaire pour atteindre le niveau de vitesse désiré.



POTENTIOMÈTRE

Les deux boutons situés dans le bas du boîtier de contrôle servent à augmenter ou diminuer l'intensité de chaque profile de vitesse. Le bouton de gauche sert à diminuer l'intensité. Lorsqu'il est actionné on voit apparaître sur l'écran une série de bâtonnets gradués du plus petit au plus grand accompagné d'un dessin d'une tortue et d'un lièvre. Le bouton de droite sert à augmenter l'intensité de la vitesse et on voit le même diagramme apparaître.

INDICATEUR DE CHARGE

L'indicateur de charge est situé dans le haut de l'écran du boîtier de contrôle. Il est représenté par une série de bâtonnets noirs. Lorsque le fauteuil est pleinement chargé, tous les bâtonnets sont noirs. Il est temps de recharger le fauteuil lorsque la moitié des bâtonnets ont perdu leur couleur.

RECHARGER LA BATTERIE

Le fauteuil est prêt à être rechargé lorsqu'il reste la moitié des bâtonnets indiquant la charge. Il suffit de brancher le fil du chargeur dans le réceptacle prévu à cette fin sous le boîtier de contrôle et ensuite de brancher l'autre fil dans une prise de courant standard.

